



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 23084 Urządzenie do masażu oczu falami radiowymi
inSPORTline Eyewish



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
OPIS PRODUKTU	3
UŻYTKOWANIE	4
KONSERWACJA	5
ŁADOWANIE	5
PARAMETRY	5
OCHRONA ŚRODOWISKA	5
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	6

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Przed użyciem zdejmij wszystkie metalowe przedmioty i biżuterię z ciała.
- Nie używaj podczas ładowania.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, skontaktuj się z serwisem.
- Nie nadaje się dla osób wrażliwych na ciepło, uczulonych na metal lub nadwrażliwej skóry.
- Nie nadaje się dla osób: kobiet w ciąży; dzieci; osób cierpiących na epilepsję, guzy, stany zapalne; osób używających rozrusznika serca; ludzi wrażliwych na ciepło, wibracje; osób cierpiących na egzemę lub schorzenia dermatologiczne. Skontaktuj się z lekarzem, aby uzyskać pomoc.

OPIS PRODUKTU

<p>The diagram shows the front and back views of the I LIFT device. The front view (left) has callouts: 1. Metal head, 2. LCD display, 3. Power button, 4. USB port, 5. Red light, 6. Intensity dial, and 11. Intensity display. The back view (right) has callouts: 7. Battery status, 8. LED indicator, 9. RF frequency indicator, 10. Vibration indicator, and 11. Intensity display.</p>	1.	Metalowa głowica masująca
	2.	wyświetlacz LCD
	3.	Przycisk zasilania / trybu
	4.	Port ładowania USB
	5.	Czerwone światło
	6.	Regulacja intensywności
	7.	Stan baterii
	8.	Kontrolka LED
	9.	Wskaźnik częstotliwości radiowej (RF)
	10.	Wskaźnik wibracji
	11.	Wyświetlacz intensywności

UŻYTKOWANIE


Przytrzymaj przycisk zasilania, aby rozpocząć. Naciśnij, aby przełączyć tryb.

1. Częstotliwość radiowa + czerwone światło + wibracje
2. Częstotliwość radiowa + czerwone światło
3. Częstotliwość radiowa + wibracje
4. Częstotliwość radiowa

Ustawienie intensywności dotyczy tylko częstotliwości radiowej.




Nałóż odpowiednią ilość kremu pod oczy na twarz.

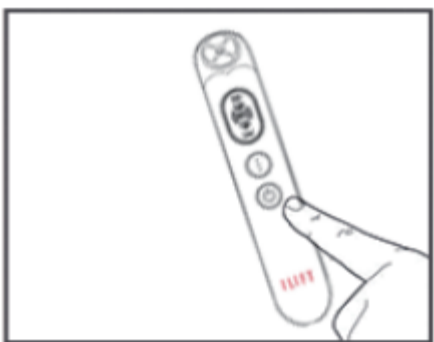

Przytrzymaj przełącznik zasilania, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby ustawić tryb. Naciśnij przycisk regulacji intensywności, aby dostosować intensywność.



Delikatnie masuj okolice oczu, jak pokazano.

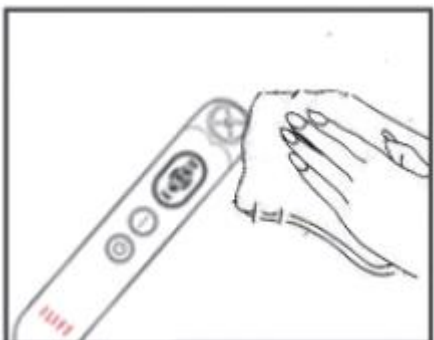

Po użyciu wyczyść głowicę masującą suchym ręcznikiem, szmatką lub serwetką.

KONSERWACJA

- Krem nałożyć równomiernie na twarz w odpowiedniej ilości, aby nie osiadł nadmiernie na głowicy.
- Po użyciu umyć głowicę suchym ręcznikiem lub serwetką.
- Chronić korpus urządzenia przed kontaktem z wodą.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- Przechowywać w zacienionym i suchym miejscu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- Chronić urządzenie przed wstrząsami i upadkami.

ŁADOWANIE

- Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, wyłącz urządzenie i naładuj je.
- Wskaźnik baterii będzie migał podczas ładowania. Po całkowitym naładowaniu symbol przestaje migać.
- Jeśli planujesz przechowywać urządzenie przez dłuższy czas, regularnie ładuj baterię.
- Odłącz ładowarkę po naładowaniu.

PARAMETRY

Nazwa:	Masażer pod oczy falami radiowymi		
Model:	IF-1208	Praca na jednym ładowaniu:	>30 min
Waga:	54g	Częstotliwość radiowa:	400kHz
Wymiary:	149,9x28x22 mm	Wejście:	DC5V/1A
Częstotliwość wibracji:	12000 obr / min	Bateria:	500 mAh
Czas ładowania:	3 godziny		

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756