



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 23190 Lędźwiowy pas powietrzny inSPORTline Ronyo



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
UŻYTKOWANIE	3
OPIS PRODUKTU	5
KONSERWACJA.....	6
OCHRONA ŚRODOWISKA	6
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Aby uzyskać lepsze wrażenia, dopasuj pas do odpowiedniego naciągnięcia.
- Jeśli chcesz zmienić położenie urządzenia, najpierw je wyłącz. Nigdy nie przesuwaj ani nie zmieniaj położenia urządzenia podczas jego działania.
- Urządzenie nie jest zabawką. Nie jest przeznaczone dla dzieci.
- W przypadku nudności zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.
- Nie używaj w jednym miejscu bez przerwy dłużej niż 2 godziny.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś wrażliwy na nacisk.
- Nie używaj urządzenia, jeśli masz jakiegokolwiek choroby skóry lub obrażenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli używasz medycznego sprzętu elektrycznego, takiego jak rozrusznik serca itp.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów.
- Urządzenie nie zastępuje opieki medycznej lub terapeutycznej.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, nie nadaje się do celów komercyjnych ani medycznych.
- Produkt nie jest odpowiedni dla osób poniżej 16 roku życia.
- Trzymaj z dala od ostrych przedmiotów i krawędzi.
- Nie stosować godzinę po posiłku.
- **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie nie jest przeznaczone dla użytkowników cierpiących na: wrażliwą skórę, wysokie lub niskie ciśnienie krwi, choroby naczyniowo-mózgowe, guzy, zaburzenia krzepnięcia, uszkodzenia łądźwi, stany zapalne lub inne choroby. Przed użyciem zawsze skonsultuj się z lekarzem.
- **OSTRZEŻENIE:** Pas nie jest odpowiedni dla kobiet w ciąży.

UŻYTKOWANIE

Upewnij się, że masz odpowiedni rozmiar.




Rzep musi znajdować się z przodu.




Pas należy umieścić między biodrami i żebrami.




Upewnij się, że zawór powietrza jest zablokowany. Jeśli nie, obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

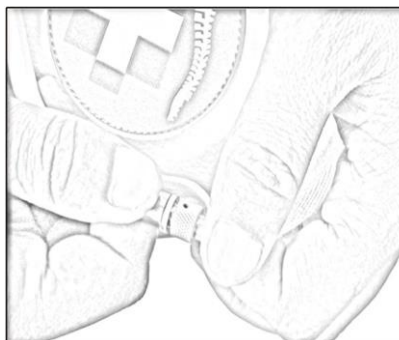

Podłącz wąż do pompy. Przerwij pompowanie, gdy tylko ciśnienie będzie wystarczające.

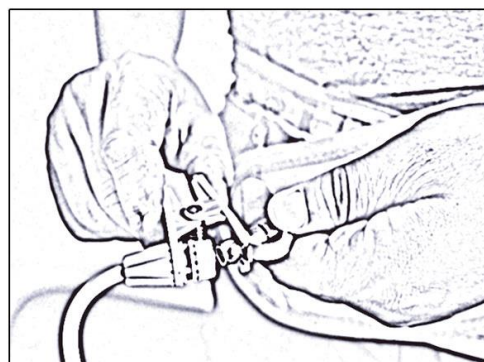


Aby zdjąć pas, wypuść powietrze, obracając zawór w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara lub używając narzędzia.

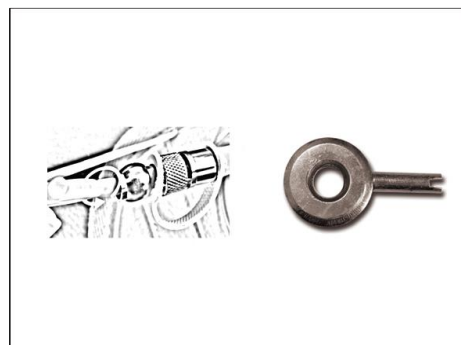

OSTRZEŻENIE: Przed zdjęciem pasa należy spuścić powietrze.

S	26-32"	66-80CM
M	32-36"	80-90CM
L	36-40"	90-100CM
XL	40-46"	100-115CM
XXL	46-52"	115-130CM
XXXL	52-58"	130-145CM

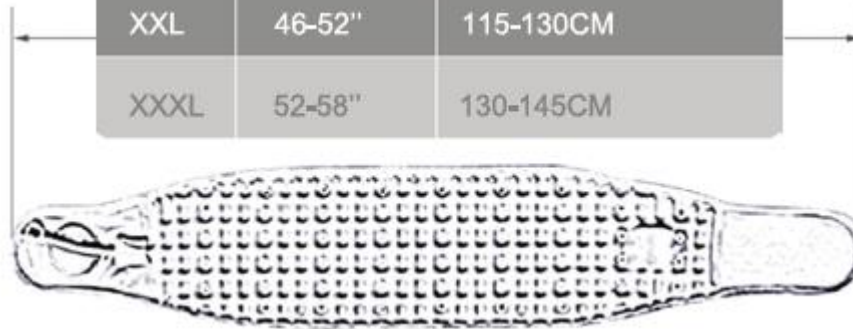

OPIS PRODUKTU



- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Zaślepki | 6. Otwory wentylacyjne |
| 2. Bawełna | 7. Pompka ręczna z manometrem |
| 3. Skóra PU | 8. Zapasowy rzep |
| 4. Przepływ powietrza | 9. Narzędzie do uwalniania ciśnienia |
| 5. Wąż powietrzny | |

KONSERWACJA

- Przechowuj pas w czystym, zacienionym i suchym miejscu.
- Nie myj pasa, po prostu wyczyść go wilgotną szmatką.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756