

Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

Niezależnie od zastosowania, ani producent, ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenia prawa, takie jak prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Wyniki są jedynie orientacyjne i nie służą jako kryterium autoryzacji różnych działań.

Zasilany 2 bateriami alkalicznymi AAA.


Aby uzyskać najdokładniejszy pomiar, zalecamy wykonanie testu 2-3 razy w ciągu 3 minut między każdym testem.

Zakres: 0,00 - 0,19% BAC i 0,0-1,9 g / l

Wykonaj test co najmniej 20 minut po spożyciu alkoholu.

Nie jeść i nie palić przez 20 minut przed badaniem.


## 23793-1 Alkomat W-TEC Beerster

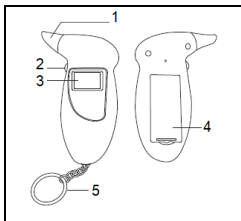

1.	Ustnik
2.	Przycisk zasilania
3.	Wyświetlacz LCD
4.	Lokalizacja baterii
5.	Brelok


## WYMIANA BATERII

Zdejmij pokrywę i włóż 2 baterie alkaliczne AAA. Następnie ponownie załóż pokrywę.

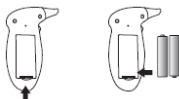

## UŻYTKOWANIE


Przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, wyświetlacz LED uruchomi się i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

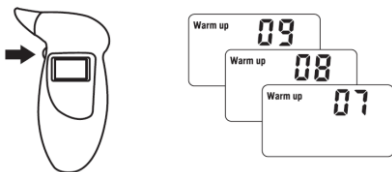

Wyświetlany jest komunikat „WARM UP” i odliczanie od 10 do 0.

Uwaga: Zawsze może się zdarzyć, że ustnik i czujnik są zatkane brudem. Czasami konieczne jest kilkukrotne włączenie i wyłączenie urządzenia.

Wyświetlany jest komunikat „Blow” i odliczanie od 10 do 0.

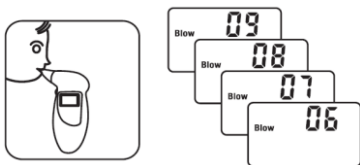

Weź głęboki wdech i wdychaj powietrze przez około 5 sekund.

Wynik jest wyświetlany:

Wyświetlacz pokazuje „Caution” i wartości od 0,02% BAC (0,2g/l) do 0,05% BAC (0,5g/l)


Wyświetlacz pokazuje „Danger” i wartości od 0,05% BAC (0.5 g / l).



Wynik jest wyświetlany przez około 10 sekund, a następnie wyłącza się.

## USTNIK

Aby wymienić ustnik, przykręć nowy ustnik zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

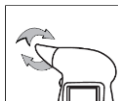

## PARAMETRY

Zakres:	0,00 % to 0,19 % BAC (0,0 – 1,9 g/l)
Dokładność:	-0,01 % ~ + 0,02 % at 0,05% BAC
Zasilanie:	2x 1,5V AAA baterie alkaliczne
Czas operacji:	Ładowanie: 10 sekund, odpowiedź: 5 sek.
Dokładność zegara:	±2 sekundy / dzień
Wymiary:	100 x 37 x 17 mm