




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

**IN 27688 Mata grzejąca do stołu do masażu inSPORTline
Mawarta**

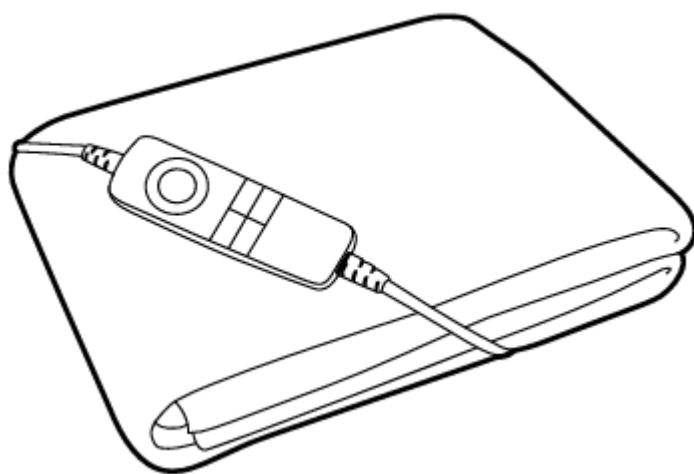

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Używaj wyłącznie zgodnie z instrukcją. Nie używaj produktu do celów innych niż te, do których jest przeznaczony.
- Skonsultuj się z lekarzem w sprawie zasadności stosowania.
- Nie zalecamy używania maty, jeżeli temperatura otoczenia przekracza 30°C.
- Używaj i przechowuj produkt z dala od substancji łatwopalnych i lotnych.
- Trzymaj matę z dala od wody. Nigdy nie dotykaj maty, która miała kontakt z wodą lub inną cieczą. Natychmiast odłącz produkt od gniazdka elektrycznego. Używać wyłącznie w suchym środowisku. Pilot i kabel nie mogą być narażone na działanie wilgoci.
- Nigdy nie używaj produktu, jeśli masz mokre ręce, stopy lub jakąkolwiek inną część ciała. Nigdy nie używaj produktu w pobliżu wanny, zlewu lub innych pojemników wypełnionych wodą.
- Podczas użytkowania nie używaj innych źródeł ciepła.
- Jeśli temperatura ogrzewania jest zbyt wysoka, należy natychmiast zaprzestać używania produktu.
- Długotrwałe używanie koca o wysokiej temperaturze ogrzewania może prowadzić do oparzeń skóry.
- Nie podgrzewaj maty w wyniku tarcia podczas użytkowania.
- Nie nadaje się dla osób wrażliwych na ciepło, z chorobami układu krążenia i kobiet w ciąży.
- Nieodpowiednie dla osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.
- Nie nadaje się dla osób z ograniczonym doświadczeniem i wiedzą, chyba że znajdują się pod nadzorem lub otrzymają instrukcje dotyczące użytkowania tego produktu od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Dzieciom nie wolno używać podgrzewanej maty, ponieważ nie są w stanie zareagować na bezpośrednie przegrzanie. Mata nie jest zabawką.
- Produkt nie może być używany jako poduszka dla zwierząt domowych.
- Jeśli używanie produktu sprawia dyskomfort, przestań go używać.
- Często sprawdzaj matę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Chronić produkt przed uderzeniami, upadkami i rozdarciami. Nie używaj ostrych przedmiotów w pobliżu maty.
- Przed każdym użyciem sprawdź stan maty, kabla i elementów sterujących.
- Jeśli podczas użytkowania wystąpi awaria lub jakiegokolwiek nietypowe zjawisko, należy natychmiast wyłączyć produkt i zaprzestać jego używania.
- Nie wystawiaj na długotrwałe bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie.
- Nigdy nie używaj maty złożonej lub skręconej w jakikolwiek sposób. Zawsze przed każdym użyciem sprawdzaj stan i integralność maty.
- Upewnij się, że mata jest prawidłowo rozłożona i wypoziomowana na całej powierzchni.

- Przed podłączeniem produktu do gniazdka elektrycznego należy zawsze upewnić się, że napięcie zasilania wskazane na etykiecie produktu jest zgodne z napięciem sieciowym w gniazdku.
- Jeśli mata, kabel zasilający lub sterownik są uszkodzone, należy je wymienić lub naprawić przez technika serwisu lub wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec obrażeniom.
- Nigdy nie używaj podgrzewanego koca bez nadzoru. Tylko do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- Nigdy nie używaj podczas snu.
- Podczas użytkowania kontrolera i przewodu zasilającego kontrolera nie można umieszczać na, pod lub w żaden sposób przykrywać na podgrzewanej macie. Należy go umieścić z dala od gorących powierzchni.
- Nigdy nie przenoś, nie ciągnij ani nie przekręcaj podgrzewanego koca za przewód zasilający, ani nie pozwalaj, aby przewód się splątał.
- Maty grzewczej nie należy umieszczać pod materacem. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na produkcie.
- Sprzedawca, importer lub producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem maty grzewczej i jej akcesoriów (urazy, oparzenia, poparzenia, pożar, zepsucie się żywności itp.)
- Koc jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno go używać do celów profesjonalnych, np. w szpitalu lub ośrodku rehabilitacyjnym.

PARAMETRY

Numer seryjny produktu:	UB19109, SS19(190*070)-1X
Wymiary:	190 x 70 cm
Moc:	100W
Napięcie	220 – 240 V
Częstotliwość	50 Hz
Waga:	1,35 kg
Materiał:	Materiał zewnętrzny: 100% poliester, podszewka: 100% poliester
Temperatura:	6 ustawień temperatury (33 / 36 / 39 / 42 / 45 / 48 °C)
Regulator czasowy:	2/4/6 godzin z funkcją automatycznego wyłączenia
Długość przewodu:	Długość przewodu: 2,3 m

STEROWANIE

	Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć
	Naciśnij, aby ustawić timer na 2/4/6 godzin z automatycznym wyłączeniem
	Naciśnij, aby zwiększyć temperaturę, tryby temperatury 1 - 6 (33 / 36 / 39 / 42 / 45 / 48 °C)
	Naciśnij, aby obniżyć temperaturę, tryby temperatury 1 - 6 (33 / 36 / 39 / 42 / 45 / 48 °C)

Temperatura wyświetlana jest na kontrolerze 1 – 6.

1. Rozłóż podgrzewaną matę w miejscu, w którym chcesz jej używać, upewniając się, że nie jest pomarszczona ani zagięta oraz że przewód zasilający wraz z kontrolerem znajdują się u góry, bliżej głowy osoby leżącej na macie.

Użyj 4 elastycznych pasków mocujących, aby przymocować matę do łóżka. Opaski umieszczone są w każdym rogu maty. Upewnij się, że mata jest stabilnie przymocowana do łóżka we wszystkich kierunkach i nie zwisa, nie składa się ani nie wygina w żaden sposób podczas użytkowania. Zanim się na niej położysz, sprawdź, czy znajduje się we właściwej pozycji.

Maty grzewczej należy używać wyłącznie z kontrolerem dołączonym do produktu. W żadnym wypadku nie używaj innego typu kontrolera.

2. Rozłóż kabel zasilający. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieciowego. Następnie włączając sieć elektryczną usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy i zaświeci się na 1s przy wszystkich przyciskach trybów sterowania 1-6 i 2-4-6.

Naciśnij przycisk zasilania na kontrolerze. Następnie za pomocą powyższych przycisków ustaw i wyreguluj żądany tryb temperatury 1-6 oraz timer 2/4/6 godzin.

3. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć podgrzewanie koca.

Kolorowe kontrolki na wyświetlaczu zasilania zgasną, wskazując, że urządzenie jest wyłączone. Teraz odłącz koc od gniazdka elektrycznego. Po użyciu wyłącz koc i odłącz go od prądu. Przed złożeniem i przechowywaniem koc należy pozostawić do całkowitego ostygnięcia. Nie składaj go zbyt ciasno.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Przed czyszczeniem zawsze odłącz matę od prądu i pozwól jej całkowicie ostygnąć (minimum 10 minut).


Mata wyposażona jest w odłączany kabel. Przed czyszczeniem i myciem zawsze odłączaj kontroler wraz z kablem.

Suszenie: rozłóż matę na płaskiej powierzchni i pozostaw do naturalnego wyschnięcia. Matę należy używać dopiero po jej całkowitym wyschnięciu.

Pierz w programie delikatnym w temperaturze 30° w worku do prania tkanin delikatnych – nie wirować. Zaleca się jednak mycie jej ręcznie, aby przedłużyć jej żywotność. Drobne zabrudzenia można usunąć szmatką lub wilgotną gąbką zamoczoną w letniej wodzie.

Zalecamy usuwanie zabrudzeń wilgotną szmatką i roztworem letniej wody z nieagresywnym środkiem czyszczącym. Przed czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający i odłączyć przewód zasilający od maty. Nie prasować maty.

Nigdy nie myj podgrzewanej maty razem z kablem zasilającym lub kontrolerem. Do suszenia nie używaj suszarki do włosów ani innych urządzeń, pozostaw matę do swobodnego wyschnięcia na powietrzu. Nigdy nie włączaj podgrzewanej maty przed wyschnięciem!

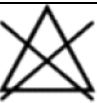	Nie czyścić chemicznie
	Suszyć na płasko
	Nie wykręcać, nie wirować
	Nie wybielać
	Nie prasować

	Prać delikatnie w temperaturze 30°C, zawsze używać worka na pranie.
	Nie suszyć w suszarce

Nie wykręcaj podgrzewanej maty ani nie susz jej w suszarce bębnowej. Rozłóż matę luźno na suszarce do ubrań i pozostaw do naturalnego wyschnięcia.

PRZECHOWYWANIE:

Ostrożnie złóż koc i przewód zasilający, aby przewód się nie przerwał. Produkt przechowywać w oryginalnym kartonie, w czystym, suchym, dobrze wentylowanym i zacienionym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Przed przechowywaniem produktu należy upewnić się, że jest on całkowicie ostygnięty, a przewód zasilający jest odłączony od gniazdka elektrycznego.

Podczas przechowywania nie kładź na macie żadnych innych przedmiotów.



This product meets all the essential requirements of the EU standards that apply to it.

Zastrzeżone zmiany w tekście i danych technicznych.

Stopień ochrony przed porażeniem prądem:



Klasa II - Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewnia izolacja podwójna lub wzmocniona.



UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Ten symbol oznacza, że zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłych odpadów komunalnych. W celu prawidłowej utylizacji, odzysku i recyklingu produkty te należy oddać do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, możesz zwrócić swoje produkty lokalnemu sprzedawcy przy zakupie równoważnego nowego produktu. Aby uzyskać więcej informacji, zapytaj władze lokalne lub najbliższy punkt zbiórki.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

