



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 28890 Elektryczny wózek inwalidzki inSPORTline
Svanson



SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	5
ROZPAKOWANIE I PRZYGOTOWANIE PRZED PIERWSZĄ JAZDĄ	5
SKŁADANIE	6
PODŁOKIETNIKI	6
PODNOŻKI	7
REGULACJA WYSOKOŚCI PODNÓŻKA	7
STEROWANIE	8
HAMULEC RĘCZNY	9
AKUMULATOR I KONTROLER	10
AKUMULATOR	10
ŁADOWANIE BATERII	11
INFORMACJE O BATERII	11
KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE	11
PARAMETRY	11
OCHRONA ŚRODOWISKA	12
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	12

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Nie używaj urządzenia, jeśli pojawiają się ostre krawędzie.
- W przypadku usterki natychmiast przerwij używanie i skontaktuj się z serwisem. Nie naprawiaj wózka inwalidzkiego samodzielnie.
- Przed użyciem naucz się, jak korzystać z wózka inwalidzkiego, znajdź bezpieczną i otwartą przestrzeń i poproś o pomoc inną osobę, dopóki nie będziesz w stanie bezpiecznie korzystać z wózka.
- Upewnij się, że produkt jest wyłączony przed wsiadaniem i wysiadaniem.
- Zawsze jedź z taką prędkością, aby nie narażać siebie ani innych osób i ich mienia.
- Zawsze zalecamy rozpoczęcie jazdy od najniższego biegu.
- Niektóre urządzenia komunikacyjne mogą działać na tej samej częstotliwości, co pilot do wózka inwalidzkiego. Jeśli masz przy sobie takie urządzenie (telefon itp.), sprawdź, czy nie będzie ono zakłócać działania kontrolera.
- Niektóre nadajniki mogą zakłócać działanie pilota do wózka inwalidzkiego.
- Jeśli zauważysz jakikolwiek niepożądany ruch lub wózek inwalidzki nagle się zatrzyma, natychmiast go wyłącz.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z opisanych sytuacji należy natychmiast wyłączyć wózek inwalidzki: nagły ruch bez ingerencji użytkownika, brak kontroli nad kierunkiem jazdy, awaria hamulca.
- Wózek inwalidzki jest przeznaczony do przewozu jednej osoby.
- Nie należy jeździć po zbyt stromych wzniesieniach.
- Nie należy jeździć pod wpływem narkotyków, leków lub alkoholu.
- Nie należy holować innych pojazdów lub przedmiotów za wózkiem inwalidzkim.
- Nie należy holować wózka inwalidzkiego za innymi pojazdami.
- Nie należy przekraczać maksymalnego dozwolonego kąta jazdy.
- Nie należy gwałtownie poruszać joystickiem, gdy wózek inwalidzki się porusza.
- Wózek inwalidzki jest przeznaczony tylko dla jednej osoby i nie należy przekraczać jego maksymalnej nośności.
- Nie należy wyłączać wózka inwalidzkiego, gdy się porusza, ponieważ może to spowodować uszkodzenie silnika lub elementów sterujących. Należy wyłączać wózek inwalidzki tylko w przypadku utraty kontroli nad nim.
- Nie należy jeździć po powierzchni, która nie jest utwardzona (piasek, głęboka trawa, drobna glina itp.)
- Nie należy jeździć po schodach.
- Przed czyszczeniem i konserwacją należy upewnić się, że wózek inwalidzki jest wyłączony.
- Nie należy włączać wózka inwalidzkiego, jeśli się na nim nie siedzi. Wózek nie jest przeznaczony do użytku na drogach publicznych. Jedź tylko po drogach do tego przeznaczonych (chodniki).
- Nie zmieniaj nagle kierunku jazdy (przód - tył). Zmień kierunek jazdy, gdy wózek się zatrzyma.

- Zawsze jedź z góry z najniższą prędkością, pozostawiając joystick blisko środkowej pozycji.
- Zawsze trzymaj stopy na podnóżku.
- Przed jazdą upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany.
- Ładuj wózek w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Przed jazdą sprawdź, czy wszystkie części są dokręcone i działają prawidłowo.
- Przed cofaniem upewnij się, że za Tobą nie ma żadnej przeszkody. Cofaj z najniższą prędkością.
- Unikaj gwałtownych ruchów i nagłych zmian kierunku.
- Trzymaj ręce i stopy na podłokietnikach.
- Nie przejeżdżaj przez przeszkody wyższe niż 5 mm.
- Nie przejeżdżaj przez ubytki dłuższe niż 10 cm.
- Maksymalne nachylenie wynosi 12 °.
- Jeśli jedziesz pod górę, nie cofaj.
- Nie jeźdź po powierzchni nachylonej o więcej niż 3° na bok.
- Nie jeździć po miękkich, nierównych lub niezabezpieczonych nawierzchniach (trawa, żwir).
- Przed zjazdem w dół ustaw najniższą prędkość, jazda w dół wydłuża drogę hamowania.
- Nie jeźdź po nierównościach, takich jak progi zwalniające itp.
- Nie jeździć po wodzie, po lodzie lub śniegu ani w warunkach słabej widoczności.
- Nie pozostawiaj wózka wystawionego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub warunków atmosferycznych.
- Chronić przed deszczem i wodą.
- Panel sterowania nie jest wodoodporny.
- Regularnie sprawdzaj stan opon. Natychmiast wymień zużyte opony.
- Nie jeźdź w deszczu ani po mokrych drogach. Istnieje ryzyko uszkodzenia elektroniki i akumulatora.
- Całkowita nośność: 130 kg
- Zdalne sterowanie do 15 m (w zależności od warunków otoczenia)
- Maksymalna prędkość do 6 km/h w optymalnych warunkach
- Maksymalny zasięg do 24 km w optymalnych warunkach
- Wózek inwalidzki napędzany jest 2 silnikami o mocy 250 W
- Wózek inwalidzki wyposażony jest w koła pełne.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU



1. Joystick	6. Regulowane podłokietniki
2. Wyjmowany podnóżek	7. Pełne tylne koła
3. Regulacja podnóżka	8. Akumulator
4. Przednie koła	9. Składane uchwyty
5. Wyjmowana poduszka	10. Przełącznik elektryczny/ręczny

ROZPAKOWANIE I PRZYGOTOWANIE PRZED PIERWSZĄ JAZDĄ

Rozpakuj wózek inwalidzki i wszystkie jego części. Upewnij się, że nie brakuje żadnych części.



Przymocuj joystick do prawej strony podłokietnika.



Naciśnij po obu stronach wózka inwalidzkiego i otwórz go.



SKŁADANIE

Aby złożyć, poluzuj środkową ramę stopami. Następnie chwyć siedzisko i pociągnij obie strony do siebie.



PODŁOKIETNIKI

Możesz wyregulować podłokietniki, naciskając dźwignię. Zawsze upewnij się, że podłokietniki są ponownie zabezpieczone.



PODNÓŻKI

Za pomocą uchwyty można regulować położenie lub zdejmować podnóżki.



REGULACJA WYSOKOŚCI PODNÓŻKA

Wysokość podnóżka można regulować za pomocą śrub imbusowych. Przed użyciem należy upewnić się, że podnóżki są zabezpieczone.



STEROWANIE



- | |
|---|
| 1. Wskaźnik poziomu naładowania baterii |
| 2. Przełącznik zasilania |
| 3. Wskaźnik biegu |
| 4. Zmniejszenie prędkości |
| 5. Klakson |
| 6. Zwiększenie prędkości |
| 7. Joystick 360° |

Po opanowaniu podstawowych ruchów do przodu i do tyłu przy najniższej prędkości, spróbuj bardziej skomplikowanych ruchów podczas pokonywania zakrętów.




Przymocuj kontroler do prawego uchwyty i dostosuj żadaną odległość. Następnie dokręć nakrętkę. Podłącz zasilanie do kontrolera.


Przyciski i elementy sterujące



1. Joystick, 2. przyciski, 3. porty zasilania

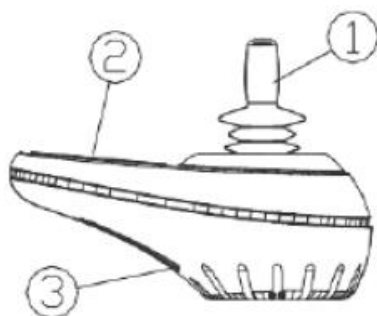


Porty zasilania

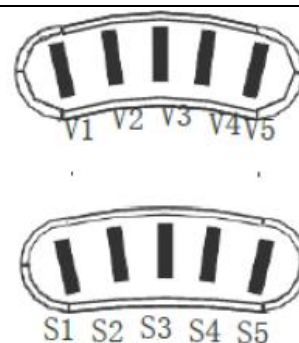

Chroń panel sterowania i joystick przed uderzeniami, upadkami lub innymi uszkodzeniami fizycznymi. Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że elementy sterujące działają i reagują na Twoje polecenia.

Chroń panel sterowania i joystick przed wilgocią i brudem. Nie wystawiaj ich na działanie warunków atmosferycznych przez dłuższy czas.

Czyść panel sterowania i joystick wilgotną szmatką bez agresywnych środków czyszczących. Zapobiegaj przedostawaniu się wody do kontrolera.

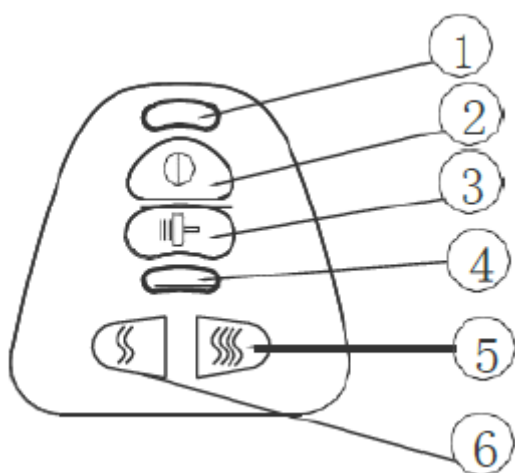

1. Wskaźnik poziomu naładowania baterii

2. Przełącznik zasilania

3. Klakson

4. Wskaźnik biegu

5. Zwiększenie prędkości

6. Zmniejszenie prędkości

Naciśnij przycisk, aby uruchomić/zatrzymać wózek. W razie potrzeby przycisku można użyć jako hamulca awaryjnego.

Wskaźnik akumulatora pokazuje aktualną pojemność akumulatora.

Wskaźniki wyłączają się po wyłączeniu kontrolera.

Użyj joysticka do sterowania kierunkiem i prędkością jazdy. Im dalej joystick znajduje się od punktu początkowego (środką), tym większa jest prędkość. Joystick automatycznie powraca do położenia środkowego. Wózek zatrzymuje się, gdy joystick powróci do położenia środkowego (automatycznie lub ręcznie). Zwolnienie joysticka powoduje automatyczny powrót do punktu początkowego.

Wskaźnik prędkości jest podzielony na 5 segmentów, od 1 (najniższa) do 5 (najwyższa) prędkość.

Naciśnij przycisk klaksonu, aby włączyć klakson.

Użyj przycisków regulacji biegu, aby wyregulować bieg.


HAMULEC RĘCZNY

Na tylnych kołach znajduje się ręczny hamulec. Gdy hamulec jest w pozycji manual (sterowanie ręczne), wózek inwalidzki może być używany jako klasyczny wózek inwalidzki bez pomocy silnika.



OSTRZEŻENIE: Wózek inwalidzki należy pchać bez pomocy silnika tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Zawsze zaciągaj hamulce na obu kołach.

AKUMULATOR I KONTROLER

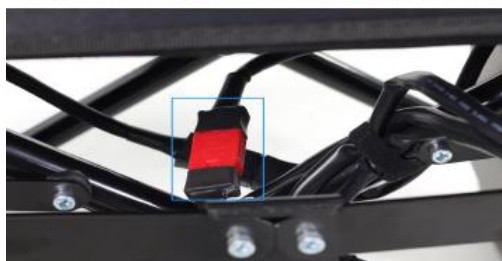

Bateria nie jest wymienna i może być zasilana wyłącznie przez port ładowania na kontrolerze. Baterię należy ładować pod stałym nadzorem.

Czas ładowania: 8 - 10 godzin

Typ baterii: 24V 20Ah (10Ah*2)



AKUMULATOR

Wózek inwalidzki jest wyposażony w akumulator litowy 24 V 12 Ah. Baterię należy wymieniać wyłącznie w autoryzowanym centrum serwisowym.

6-miesięczna gwarancja na akumulator - gwarantujemy, że nominalna pojemność akumulatora nie spadnie poniżej 70% jego całkowitej pojemności w ciągu 6 miesięcy od daty sprzedaży produktu.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczne użytkowanie akumulatora, należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji. Należy natychmiast zaprzestać korzystania z akumulatora, jeśli jest on uszkodzony, wycieka z niego płyn lub wyczuwalny jest nietypowy zapach.

- Żywotność akumulatora jest ograniczona. W przypadku korzystania z akumulatora, którego żywotność przekracza normę, częstotliwość ładowania może wzrosnąć, a zasięg wózka inwalidzkiego ulegnie zmniejszeniu.
- Nie otwieraj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia. Nie wkładaj obcych przedmiotów do akumulatora.
- Nie dotykać akumulatora metalowymi przedmiotami. Akumulator może eksplodować lub ulec uszkodzeniu.
- Należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki.
- Podczas jazdy należy przestrzegać lokalnych przepisów i praw.
- Akumulator można ładować w sposób ciągły.
- Idealna temperatura ładowania akumulatora wynosi od +10°C do +30°C.
- Jeśli akumulator będzie używany przez dłuższy czas, jego temperatura będzie wyższa. Jest to normalny stan akumulatora.
- W przypadku korzystania z akumulatora w zimnym otoczeniu jego zasięg będzie niższy.
- Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować baterii.

ŁADOWANIE BATERII

Akumulator jest ładowany za pomocą ładowarki AC 110-240 V 50-60 Hz, wyjście 24 V, 2 Ah.

Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator. Następnie rozładuj akumulator, używając go, nie jeżdżąc szybko i nie oddalając się zbyt daleko od miejsca zamieszkania, dopóki nie nauczysz się obsługi wózka. Następnie należy ładować akumulator przez 8-14 godzin. Po 4-5 cyklach ładowania pojemność akumulatora zostanie wykorzystana w 100%.

INFORMACJE O BATERII

Ładuj akumulator tak często, jak to możliwe po użyciu. Akumulator stopniowo się rozładowuje, nawet gdy nie jest używany. Jeśli nie używasz wózka inwalidzkiego regularnie, ładuj akumulator raz w tygodniu. Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Do czyszczenia należy używać łagodnych detergentów i wilgotnej ściereczki. Nie należy używać agresywnych środków czyszczących.
- Zawsze należy dokładnie osuszyć wszystkie części, zwłaszcza części elektroniczne.
- Trzymać kontroler i panel z dala od wody. Nie należy używać myjek wysokociśnieniowych do czyszczenia.
- Sprawdzić stan kabli i połączeń.
- Przechowywać wózek inwalidzki w dobrze wentylowanym miejscu, wolnym od gazów żrących i o wilgotności powietrza mniejszej niż 80%.

PARAMETRY

Materiał ramy	Stal o wysokiej wytrzymałości
Silnik	Silnik szczotkowy 250W*2 z hamulcem elektromagnetycznym
Akumulator	24V 10Ah*2 akumulator kwasowo-ołowiowy
Ładowarka	AC110-240V 50-60Hz, 24V
Kontroler	360° joystick
Ładowność	130 kg
Czas ładowania	8-10 godzin
Prędkość do przodu	0-6 km/h
Prędkość do tyłu	0-6 km/h
Promień skrętu	60 cm
Nachylenie	≤ 13°
Zasięg	20-25 km
Wysokość siedziska	45 cm
Koła przednie	8 cali
Koła tylne	12 cali
Wymiary opakowania	74.5*46*76.5 cm
Masa brutto	48 kg
Masa netto z akumulatorem	45 kg

Masa netto bez akumulatora	36 kg
----------------------------	-------

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekazaj je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy



DEKLARACJA ZGODNOŚCI ES

IMPORTER:

Seven sport s.r.o., Strakonická 1151/2C, Praha 5-Hlubočepy 150 00

IČ: 268 47 264

Czech republic

Deklaruje na własną odpowiedzialność, że

produkt: IN 28890 Elektryczny wózek inwalidzki inSPORTline Svanson

spełnia

wymagania techniczne dotyczące produktu określone przez przepisy rządowe

Produkt jest zgodny z (EU)2017/745 i następującymi normami:

(EU) 2017/745

EN ISO 14971:2019

EN ISO 15223-1:2021

EN ISO 20417:2021

EN ISO 10993-1:2020

EN ISO 10993-5:2009

EN ISO 10993-10:2013

EN 12184:2014

EN 60601-1-2:2015/A1:2021

ISO 7176

EN 60601-1:2006/A2:2021


MSDS / Anbotek 18270BC10298503 / 01.04.2022

Producent:

ZheJiang J&J Mobility Co., Ltd

#18, Baiyang Street, WuyiJinhua City, ZheJiang. China

Vítkov, 2025

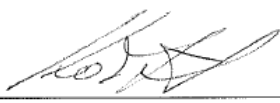

Seven Sport s.r.o.
Bořvojská 35/370, 150 00 Praha 3
IČO: 26847264 DIČ: CZ26847264
tel./fax: +420 550 300 970 ②

SEVEN SPORT s.r.o.
Roman Košťál, jednatel společnosti