



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 29645 Masażer mięśni i nerwów inSPORTline Zapster

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do przyszłego użytku.
- Nie zdejmuj elektrod z ciała, gdy urządzenie jest włączone.
- Nigdy nie umieszczaj elektrod na głowie.
- Elektrody mogą powodować podrażnienia skóry lub zwiększać jej wrażliwość z powodu stymulacji elektrycznej lub użycia żelu przewodzącego. W takim przypadku natychmiast przerwij używanie urządzenia i zgłoś się do lekarza.
- Osoby z chorobami serca lub padaczką lub podejrzeniem tych chorób nie mogą używać tego produktu.
- Nie należy umieszczać elektrod na otwartych ranach, wysypkach, opuchniętych obszarach, zaczerwienionej skórze, obszarach dotkniętych infekcjami, stanami zapalnymi, żylakami i innymi urazami skóry.
- Nie należy umieszczać elektrod na szyi, ponieważ mogą one powodować skurcze mięśni i zaburzenia oddychania, ciśnienia krwi lub arytmie serca.
- Nie należy umieszczać elektrod na klatce piersiowej, ponieważ prąd może spowodować arytmie serca.
- Nie należy umieszczać elektrod na obszarach z guzami.
- Nie należy umieszczać elektrod na obszarach z metalowymi implantami.
- Nie należy używać podczas snu, jazdy samochodem lub pływania.
- W przypadku wystąpienia powikłań podczas menstruacji lub po porodzie należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
- Nie należy umieszczać elektrod na obszarach, w których wykonywane są krótko- lub długotrwale zastrzyki.
- Nie należy używać, jeśli niedawno przeszedłeś operację.
- Nie należy używać, jeśli cierpisz na chorobę niedokrwinną kończyn dolnych.
- Nie nadaje się dla dzieci.
- Nie używaj ani nie umieszczaj urządzenia w pobliżu urządzeń MRI, CT, urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne lub dźwiękowe, wykrywaczy metalu lub podobnych urządzeń.
- Nie modyfikuj, nie przerabiaj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie.
- Nie używaj, jeśli używasz rozrusznika serca lub innego elektronicznego urządzenia medycznego.

- Nie używaj w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki, prysznice, baseny itp.
- Nie używaj elektrod podczas kąpieli.
- Powierzchnie elektrod nie mogą się nakładać.
- Nie umieszczać elektrod na tętnicach, chrząstkach i kościach.
- Nie używać elektrod w następujących przypadkach: ciąża lub podejrzenie ciąży.
- Nie umieszczać elektrod na biżuterii, kolczykach lub innych metalowych przedmiotach umieszczonych na ciele.
- Nie używać w pomieszczeniach, w których występują łatwopalne lub wybuchowe gazy.
- Nie używać produktu podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych, obsługi ciężkich maszyn lub podczas czynności, w których nagłe skurcze mięśni mogą zagrażać życiu.
- Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli cierpisz na choroby serca lub masz zwiększoną wrażliwość na zaburzenia rytmu serca.
- Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli cierpisz na cukrzycę i przyjmujesz insulinę.
- Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli przebywasz w ośrodku rehabilitacyjnym.
- Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, nawet jeśli cierpisz na chorobę lub uraz nie wymieniony w instrukcji.
- Elektrody mogą wpływać na objawy lub je nasilać: krwawienie po wypadku lub urazie. Mogą wpływać na powrót do zdrowia po operacji. Menstruacja.
- Nigdy nie umieszczaj elektrod na ciele podczas pracy urządzenia. Istnieje ryzyko porażenia prądem. Jeśli chcesz przenieść elektrody, musisz wyłączyć urządzenie.
- Elektrody są używane w parach; nie łącz różnych typów elektrod.
- W przypadku wystąpienia nudności, bólu głowy lub utraty przytomności należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
- Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby zdrowe. Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych o zdrowej skórze.
- Przed nałożeniem elektrod należy dokładnie oczyścić skórę z zabrudzeń i osuszyć.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych części lub zatwierdzonych zamienników. Nie należy mieszać innych modeli lub typów urządzeń.
- Elektroda musi przylegać do skóry na całej powierzchni. Nie należy używać elektrod, które nie przylegają równo do skóry.
- Przed użyciem sprawdź żel przewodzący elektrod. Jeśli jest suchy, nie używaj elektrody.
- Zaczerwienienie skóry po użyciu jest normalne, jeśli znika w ciągu 30 minut od użycia. Jeśli zaczerwienienie nie znika w ciągu 30 minut, nie używaj elektrod na tym obszarze, dopóki zaczerwienienie nie zniknie.
- Skontaktuj się z producentem w celu wymiany elektrod i sprawdzenia kompatybilności.
- Elektrody mają żywotność 20–30 użyc, w zależności od intensywności użytkowania, klimatu, warunków przechowywania itp.
- W przypadku wystąpienia długotrwałego podrażnienia skóry po użyciu należy zgłosić się do lekarza.
- Wymień elektrody, jeśli nie są przyczepne, uszkodzone lub zużyte.
- Regularnie sprawdzaj miejsce zastosowania.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zastąpienia profesjonalnej opieki medycznej.
- Nadaje się do użytku domowego.



Kruche, chroń
uszkodzeniami fizycznymi

przed



Przed użyciem przeczytaj instrukcję



Typ budowy ciała B



Produkt nie może być umieszczany w pojemnikach na odpady sortowane lub odpady komunalne. Musi zostać zabrany przez sprzedawcę lub przekazany do ekologicznej utylizacji w obrębie gminy.

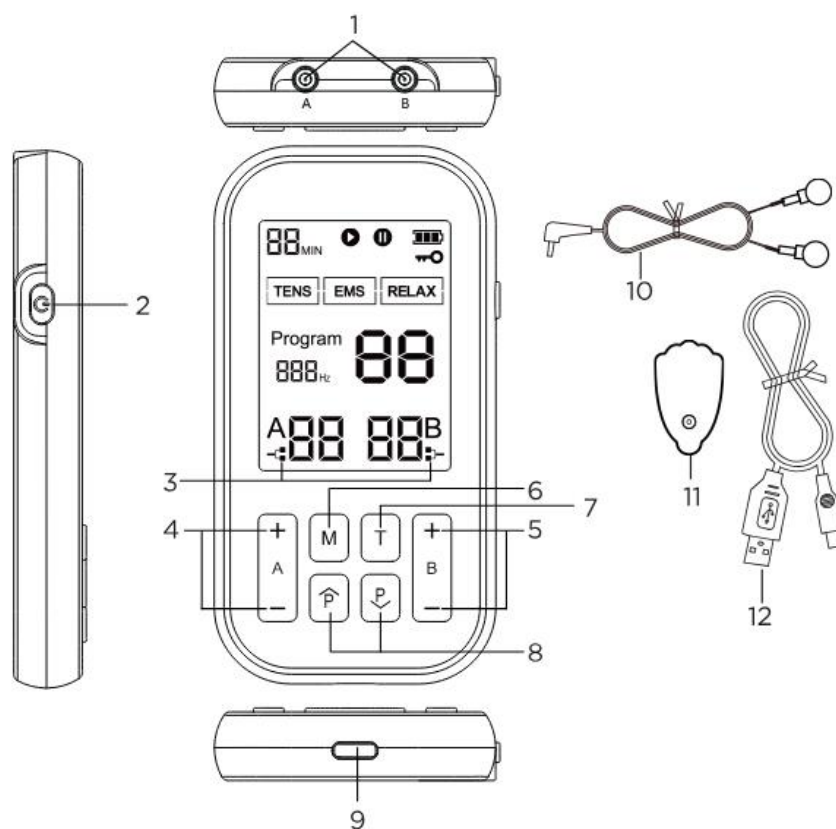
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Duży podświetlany wyświetlacz LCD.
- Wyjścia A/B o różnej intensywności.
- 3 tryby z programami: TENS (P1 – P24), EMS (P25 – P48), Relax (P49 – P60)

EMS powoduje intensywne skurcze mięśni podczas treningu lub delikatne wibracje podczas relaksu.

TENS to zastosowanie prądu elektrycznego przez skórę, który podrażnia zakończenia nerwowe i włókna, co prowadzi do uśmierzania bólu.


- Akumulator 180mAh z możliwością ładowania, do 10 godzin pracy na jednym ładowaniu.
- Ustawienie czasu pracy: 10 – 60 min, wartość oryginalna: 20 min.




- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Wyjście: kanały A/B | 7. Ustawienie timera/pauzy |
| 2. Przycisk zasilania/blokada | 8. Ustawienia programu |
| 3. Wskaźnik pomyślnego połączenia | 9. Port ładowania USB-C |
| 4. Regulacja intensywności dla kanału A | 10. Kabel do podłączenia elektrod |
| 5. Regulacja intensywności dla kanału B | 11. Elektrody |
| 6. Wybór trybu (TENS/EMS/FITNESS) | 12. Kabel USB-C |

UŻYTKOWANIE

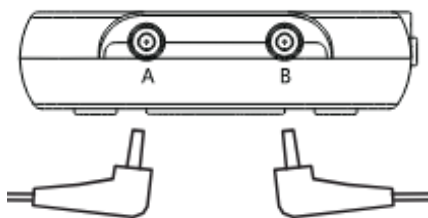
1. Podłącz kable do wyjścia



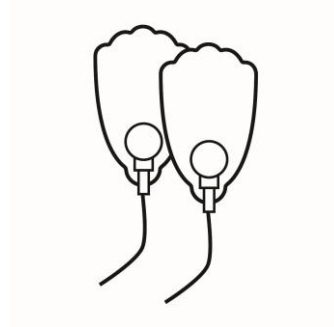
2. Podłącz elektrody i usuń folię ochronną



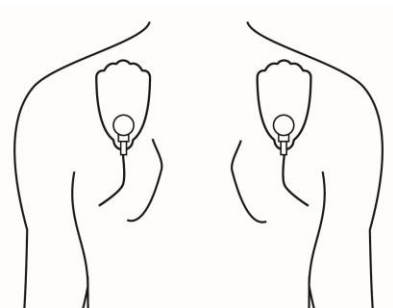3. Przyklej elektrody do czystej skóry



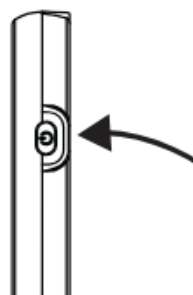
4. Aby rozpocząć, przytrzymaj przycisk, naciśnij, aby zablokować pozostałe przyciski, z wyjątkiem przycisku zasilania.




5. Naciśnij „M”, aby wybrać tryb



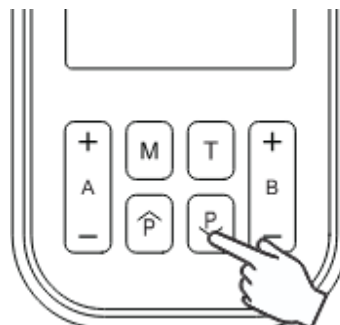6. Naciśnij $\hat{P}/\hat{P}$, aby wybrać program



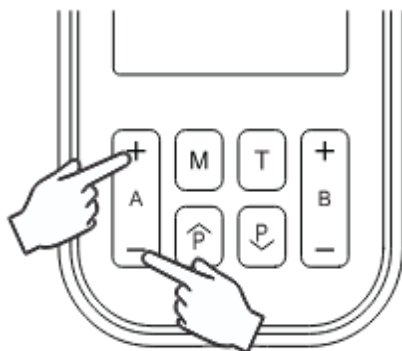7. Naciśnij „+ / -”, aby dostosować intensywność dla wybranego kanału.



8. Naciśnij „T”, aby zmienić czas działania. Przytrzymaj, aby wstrzymać i uruchomić program.



POZYCJE ELEKTROD

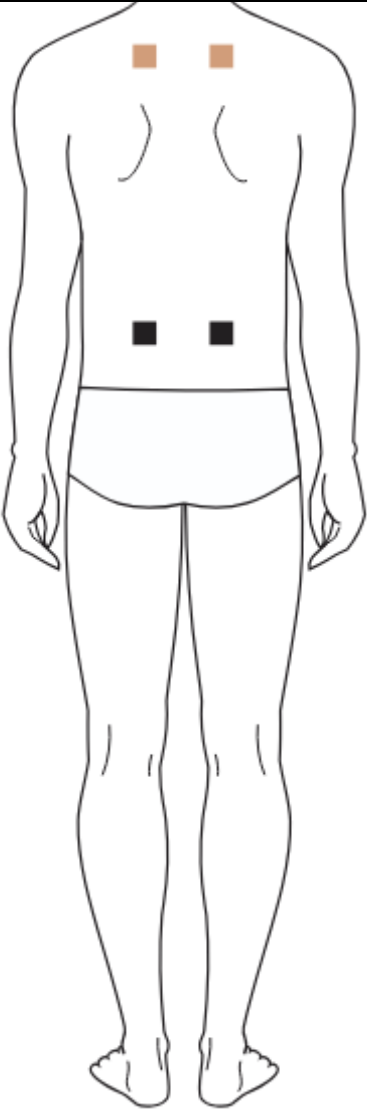
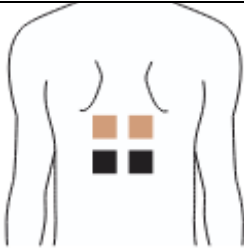
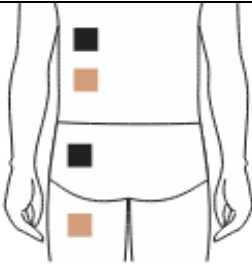
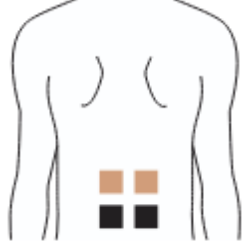
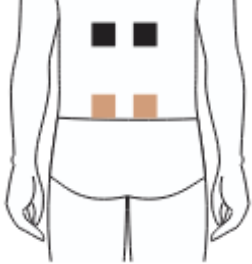
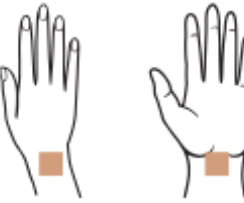
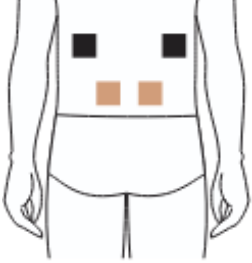
Kanały urządzenia:


Urządzenie posiada dwa niezależne kanały: Kanał A i Kanał B. Każdy kanał może być używany dla:

- Dwóch różnych miejsc na ciele tej samej osoby lub
- Dwóch różnych osób.

Każdy kanał można ustawić w innym trybie i poziomie intensywności.

- Czarne/beżowe pady oznaczają, że są na tym samym kanale.
- Cztery pady (dwa na każdy kanał) mogą pracować jednocześnie, ale należy upewnić się, że pady tego samego koloru są umieszczone na jednym korpusie, jeśli są używane przez dwie osoby.

		
Szttywne ramiona		Mięśnie szyi
		
Mięśnie prostownika grzbietu		Biodra
		
Dolna część pleców		Rwa kulszowa
		
Zespół cieśni nadgarstka		Przepuklina dysku

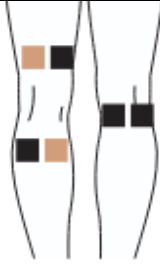		
Ból barków	Przewlekły ból biodra	Ból kolana
		
Dolna część nóg	Ból stopy	

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA SKÓRY

Aby zmniejszyć ryzyko podrażnienia skóry, zwłaszcza jeśli masz wrażliwą skórę:

- Oczyszczyć obszar zastosowania mydłem i wodą. Dokładnie zmyj mydło i osusz skórę.
- Wytrzyj obszar serwetkami, aby przygotować aplikację.
- Usuń elektrody zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów.
- Po użyciu zaleca się nałożenie balsamu na obszar zastosowania.
- Nigdy nie umieszczaj elektrod na uszkodzonej lub podrażnionej skórze.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz elektrody. Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym i zacienionym miejscu.
- Przyklej folie ochronne z powrotem do elektrod po użyciu.
- Naładuj urządzenie co najmniej raz na trzy miesiące.
- Nie używaj elektrod nieprzerwanie w jednym miejscu dłużej niż 30 minut.
- Warunki pracy: 5° C ~ 40° C, ≤80% RH, 700 hPa ~ 1060 hPa
- Warunki przechowywania: -20° C ~ 55° C, ≤93% RH, 700 hPa ~ 1060 hPa.

PRZECHOWYWANIE ELEKTROD

- Temperatura przechowywania 5°C ~ 27°C
- Wilgotność: 30%~80%

FAQ

Odczucie intensywności pomiędzy elektrodami jest różne	Zjawisko powszechne, różne części ciała reagują inaczej	Nie ma potrzeby żadnej regulacji, należy upewnić się, że elektrody są umieszczone na całej długości.
Intensywność jest niska nawet przy najwyższym ustawieniu	Elektrody nie są prawidłowo umieszczone	Umieść obie elektrody prawidłowo
	Elektrody nie są prawidłowo umieszczone	Upewnij się, że na elektrodach nie ma żadnej folii ochronnej
	Elektrody zachodzą na siebie	Elektrody nie mogą na siebie nachodzić
	Przewód zasilający nie jest prawidłowo zamocowany	Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony
	Intensywność stopniowo maleje	Organizm przyzwyczaja się do ustawionej intensywności, zwiększa się wydolność
	Niski poziom naładowania akumulatora	Naładuj baterię
Skóra jest podrażniona lub zaczerwieniona	Powierzchnia żelu jest wysuszona lub brudna	Zwilż opuszkami palców i delikatnie wyczyść powierzchnię
	Nadmierny czas użytkowania lub wysoka intensywność	Skróć czas użytkowania lub zmniejsz intensywność
	Elektrody są zużyte	Wymień elektrody
Niski poziom naładowania baterii, wyświetlacz LCD nie uruchamia się	Niski poziom baterii	Naładuj baterię
Urządzenie wyłącza się podczas użytkowania	Niski poziom naładowania baterii	Naładuj baterię
	Przewód zasilający jest uszkodzony	Wymień kabel
Elektrody nie można zamocować	Folia ochronna jest nadal przymocowana do elektrody	Zdejmij folię ochronną
	Mokra skóra	Osusz elektrodę i skórę
	Powierzchnia jest uszkodzona	Wymień elektrody
Powierzchnia elektrody jest uszkodzona	Zużyta elektroda	Wymień elektrody
	Elektroda była nieprawidłowo przechowywana	Wymień elektrody

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii jako odpadów domowych, ale oddaj je do punktu zbiórki w celu recyklingu podzespołów elektronicznych i baterii. Nieprawidłowa utylizacja może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiećniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużyтыми w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

